

NB RFID

RFID Бейдж медсестры беспроводной.

Устройство поста медсестры мобильное.

ПАСПОРТ

NB-RFID NB-RFID-A0122



Технические характеристики:

Батарея: 3,3 В 320 мА

ЖК-дисплей: 1,3 " OLED

Клавиатура: Поверхность с антимикробной мембраной;

Порт зарядки: USB Type C

Частота: 2,4 ГГц

Общие сведения:

- Компактное мобильное устройство медсестры, которое может перемещаться вместе с персоналом по отделению;
- Имеет встроенный 1,3-дюймовый OLED-дисплей для отображения вызовов в системе;
- При получении вызова устройство издает звуковой сигнал и вибрирует;
- Все текущие неотработанные вызовы в порядке очереди поступления отображаются на дисплее, между ними можно переключаться;
- Если вызов пришел из критической палаты, медсестра может сразу инициировать экстренный вызов врача;
- Встроенная RFID метка и BLE модуль позволяют фиксировать перемещение медсестры по отделению и вести протокол событий по перемещениям персонала;
- Встроенная RFID метка позволяет использовать этот бейдж для регистрации в палате и снятия вызовов, также, можно использовать как стандартную карту доступа в другие помещения;
- Устройство может быть размещено на кармане медсестры или на шнурке, в удобном месте;
- Антимикробное мембранное покрытие позволяет безопасно дезинфицировать устройство, допускается применять в инфекционных отделениях;
- Встроенный аккумулятор позволяет работать без перезарядки 120 часов, разъем C-type для подключения к зарядному устройству.
- Рекомендованное количество на отделение 1-3 шт, по числу работающих медсестер в смену.
- Подобное решение на сегодня не предлагает ни один российский производитель.

3. Подключение:

- Все изделия оборудования системы палатной сигнализации СмартКолл изготовлены для применения в медицинских учреждениях различного типа.
- Устройство беспроводное, идет в комплекте с зарядным устройством. Подключается к терминалу медсестры.

4. Программирование

- Программирование и пуско-наладка осуществляются с помощью программного обеспечения через сервер системы специалистами, прошедшими обучение в НАО «СмартКолл».

5. Техническое обслуживание:

- Рекомендуемый минимум мероприятий по техническому обслуживанию состоит в ежемесячном внешнем осмотре, очистке от пыли и грязи.
- Рекомендуется также, ежемесячно проверять через сервер наличие ошибок в системе, формировать протокол событий.

5. Транспортирование и хранение:

- Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта. Транспортная тара должна быть защищена от прямого попадания осадков. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с изделиями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- Значение климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84. Хранение изделия в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Свидетельство о приемке и упаковке:

- Маркировка устройства, артикул, заводской номер и дата выпуска (указаны на корпусе каждого изделия) признано годным для эксплуатации и упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

7. Гарантия изготовителя:

- Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты выпуска.
- При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием признаков неисправности.

8. Сведения о сертификации:

- Декларация о соответствии ЕАС:

9. Рекламации:

- В случае выхода изделия из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с актом признаков неисправности вернуть поставщику с указанием следующих сведений в акте: Поставщик изделия, Адрес поставщика, Время хранения, Дата ввода в эксплуатацию, Дата возникновения отказа(неисправности), внешние проявления отказа – неисправности.

9. Сведения о поставщике оборудования:

Наименование компании: _____
Адрес: _____
Телефон и электронная почта: _____
Дата поставки: « ____ » « ____ » 202__ г. _____ (Подпись) _____

НАО «СмартКолл»
Российская Федерация
115114, г. Москва, ул. Летниковская д. 16, офис 203
office@smcall.ru