


SCRCU10, RCU10

Палатный терминал с функцией палатного контроллера.

SCRCU10 RCU10 RCU10-A0122

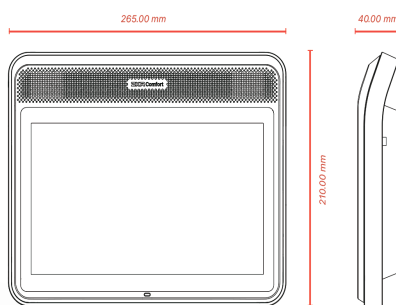

Технические характеристики:

- Электроснабжение – 24В, PoE
- Дисплей 10", разрешение 800*600
- Операционная система Linux;
- Процессор ARM Cortex;
- Оперативная память – 128M RAM, 8Gb ROM;
- Встроенный кардридер – Mifare;
- Встроенный громкоговоритель – 3Watt
- Полная дуплексная связь :
- Поддерживаемые языки: Русский, доп. Английский;
- Размеры – 265mm*210mm*40mm;
- Вес – 500 гр
- Рабочая температура – от -10 до +40, влажность – 30-80%;
- Потребляемая мощность – 18Вт

ПАСПОРТ

Общие сведения:

- 10-ти дюймовый тачскрин палатный терминал с функцией палатного контроллера и встроенным считывателем карт RFID;
- Обеспечивает электропитание и связь между Терминалом медсестры в этом отделении и всеми устройствами в палате пациента, которые к нему подключаются. Является палатным контроллером для устройств, размещенных в палате и сан.узле – 8 портов RJ45 на обратной стороне для подключения: 1 порт – аплинк, 2 порт – для подключения лампового модуля LU IP или нескольких ламповых модулей LU-IO IP, 3-8 порты – для подключения LXBCU, LXPCU, LXCMB (соединительный модуль для подключения LXPHV IP).
- Подключается к сетевому коммутатору;
- Обеспечивает маркировку присутствия медсестры, врача, второй медсестры в палате - встроенный считыватель карт Mifare, который медсестры и персонал используют для маркировки присутствия и подтверждения своей личности при ответе на вызовы. Все карты, считанные устройством, проверяются на авторизацию.
- Обеспечивает экстренный вызов – срочный вызов врач, реанимационной бригады медсестрой из палаты (после маркировки присутствия);
- Обеспечивает двустороннюю голосовую связь – с другими терминалами, палатами, постами ;
- Отображает на дисплее информацию о вызовах из других палат, номера палат и номера коек;
- Может осуществить трансляцию объявлений (с поста медсестры или другого терминала) на все терминалы отделения.

3. Подключение:

- Все изделия оборудования системы палатной сигнализации СмартКолл изготовлены для применения в медицинских учреждениях различного типа.
- Устройство палатного терминала **SCRCU10** подключается к сетевому коммутатору, посредством кабеля UTP 6 категории со стандартным разъемом RJ-45.
- Монтаж накладного типа, вывод кабелей для устройств - на стене, в месте установки SCRCU10.

4. Программирование:

- Программирование и пуско-наладка осуществляются с помощью программного обеспечения через сервер системы специалистами, прошедшими обучение в НАО «СмартКолл».

5. Техническое обслуживание:

- Рекомендуемый минимум мероприятий по техническому обслуживанию состоит в ежемесячном внешнем осмотре, очистке от пыли и грязи.
- Рекомендуется также, ежемесячно проверять через сервер наличие ошибок в системе, формировать протокол событий.

5. Транспортирование и хранение:

- Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта. Транспортная тара должна быть защищена от прямого попадания осадков. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с изделиями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- Значение климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84. Хранение изделия в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Свидетельство о приемке и упаковке:

- Маркировка устройства, артикул, заводской номер и дата выпуска (указаны на корпусе каждого изделия) признано годным для эксплуатации и упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

7. Гарантия изготовителя:

- Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты выпуска.
- При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием признаков неисправности.

8. Сведения о сертификации:

- Декларация о соответствии ЕАС:

9. Рекламации:

- В случае выхода изделия из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с актом признаков неисправности вернуть поставщику с указанием следующих сведений в акте: Поставщик изделия, Адрес поставщика, Время хранения, Дата ввода в эксплуатацию, Дата возникновения отказа(неисправности), внешние проявления отказа – неисправности.

9. Сведения о поставщике оборудования:

Наименование компании: _____

Адрес: _____

Телефон и электронная почта: _____

Дата поставки: « ____ » « ____ » 202 ____ г. _____ (Подпись) _____

НАО «СмартКолл»

Российская Федерация

115114, г. Москва, ул. Летниковская д. 16, офис 203

office@smcall.ru